

BODY FACE

❁ Speciális arckezelések IONTO-COMED készülékekkel

Kozmetikusok ajánlásával > 2-7. old.

Középpontban a férfiak bőre

SKEYNDOR MEN Professzionális és eladási
termékcsalád férfiaknak > 8-9. old.



❁ Akciós és használt termékek extra kedvező áron

> 10-11. old.

A Hírlevélben megadott akciós áraink
2012. május 15-ig érvényesek!
Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!



Siklósi Zsuzsanna ajánlásával

IONTO-MESOporese és SKEYNDOR Mesoscience



Siklósi Zsuzsanna


18 éve dolgozik kozmetikusként, és a saját kozmetikai szalonját vezeti. A hagyományos kozmetikai kezelések mellett nyitott az újdonságok iránt, folyamatosan képezi magát.

Kozmetikus kezelési javaslata komplex arckezeléshez

Minden kozmetikus, aki hivatásának is érzi szakmáját, folyamatosan keresi azokat a megoldásokat, melyekkel még szebbé teheti vendégei bőrét. Kezelje a kialakult problémákat, bármi is annak oka. A mezoterápia kezeléseket évek óta figyelemmel kísértük, de most, hogy megjelent az IONTO-MESOporese, rögtön szimpatikussá vált ez az egyedülálló, nagy hatékonyságú kezelési koncepció. A kezelés eredménye önmagáért beszél.



A mezoterápia egy olyan bőrfeszítő, bőr-fiataltató esztétikai eljárás, mely során különböző hatóanyagokat (vitaminokat, antioxidánsokat, ásványi anyagokat, biológiai aktivátorokat, hialuronsavat, növényi őssejteket...) juttatunk be a bőr különböző rétegeibe. 18 apró tűhegy finoman megnyitja a bőrgátat és így a magas koncentrációjú aktív hatóanyagok egyenesen jutnak a bőr rétegeibe. A mezoterápiás hatóanyagoknak köszönhetően a bőrben számos olyan molekula kezd el termelődni, melyek aktiválják

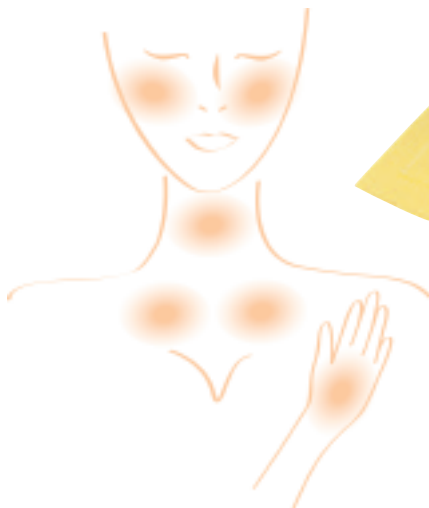

a kollagén és a rugalmas rostok termelődését, fokozzák a bőr anyagcseréjét, elősegítik a bőr regenerációját, optimalizálják a működését. A kezelés hatására a bőr tömörebb tapintású, rugalmasabb, feszesebb, fiatalosabb lesz. A mezoterápia kezelés biztonságos, gyakran ismételhető beavatkozás, mely segíti megőrizni az egészséges és fiatalos bőrképet. Kúraszerűen lehet alkalmazni, és nagyon jól kombinálható más arcifiataltó kezelésekkel.



IONTO-MESOporese
595 000 Ft + SKEYNDOR
ajándécsomag



A hatóanyagok egy része elraktározódik, így hosszabb időn keresztül is kifejtik hatását. Szalonunkban azt tapasztaltuk, hogy az érzékenyebb bőrű vendégeknél bőrpír alakulhat ki, de a tünetek pár órával a kezelés után elmúlnak.

Az IONTO-MESOporese egy rendkívül esztétikus, könnyen tisztán tartható, modern, egyei készülék. Használata egyszerű, biztonságos. Igazán kreatívak lehetünk, használhatjuk a készüléket önmagában hatóanyag nélkül, illetve különböző hatóanyagokkal, mint például SKEYNDOR Mesoscience termékek.



Ajándécsomag!
SKEYNDOR
Mesoscience termékek
100 000 Ft
értékben!

Mezotherápiás hatóanyagok

mesoscience BY SKEYNDOR

SKEYNDOR –

A bőrfiatalítás specialistája

A tudományos kozmetika alapjaira támaszkodva és az elektrokozmetikai kezelések legújabb fejlesztéseinek felhasználásával a **SKEYNDOR** megalkotta a **Mesoscience** termékcsaládját, mellyel rövid idő alatt nagy hatékonysággal és alapossággal lehet felvenni a küzdelmet a leggyakoribb esztétikai bőrproblémák, mint például a ráncok (Mesofiller), petyhüdség (Mesolift), foltok (Mesobright Vit. C), striák és narancsbőr (Mesofirmness) ellen.

Mesofiller (Ráncfeltöltő)

✿ **Mikro-kollagén:** „Felhám növelő szérum”. Stimulálja a kollagénszemcsék beépülését a kötőszövetbe („dermisz feltöltés”).

✿ **Liposzómás polifenolok:** Az öregedési folyamat során meggyengült sejtek regenerálása. Bőrstimuláló hatás („bőrfiatalítás”).

✿ **Mikro-tengerifű részecskék:** rugalmasság fokozó, kollagén növelő hatóanyag („öregedésgátló hatás”).

Mesolift

Lifting – Főbb aktív hatóanyagok:

✿ **Biopeptidok,** melyek szabályozzák a bőr mechanikai funkcióját: két új generációs peptidcsalád, melyek együttes módon hatva ellazítják a bőrben lévő feszültségeket és lágyítják a vonásokat.

✿ **Aminopropán-dihidrogén-foszfát („APPA”):** Aktív sejthírvivő (messenger) mely stabilizálja és kiegészíti a szabályozó peptidok működését. Stimulálja a fibroblaszt sejtnövekedését és fokozza a kollagéneképződést, az aszkorbinsavnál erőteljesebb lifting hatást hozva létre ezzel.

Külső lifting vagy makrolifting – Főbb aktívhatóanyagok:

✿ **Kis molekulású, hidrolizált kollagén:** hidrolizált tengervíz-koncentrátum, mely áthatol az extracelluláris mátrixon, és fokozza a bőr támasztóképeségét (extracelluláris lifting).

✿ **Közepes molekulású zabpoliszacharidok:** zabcukor-oldat, mely a bőr lipidjeihez csatlakozva elindítja a bőr középső rétegének lifting folyamatát (lipolifting).

✿ **Nagy molekulású szója proteinek:** Kémiaiag módosított proteinoldat, mely a bőr proteinjeihez kapcsolódva felszinközeli lifting hatást fejt ki.

Mesobright Vit. „C”

Jól felszívódó ionizált C-vitamin származék. Halványítja a pigmentsejteket a melanocitákban és a felhám alsóbb rétegeiben.

✿ **Ionizált C-vitamin:** Ionizált C-vitamin származék, közepes felszívódási képességgel, gyors hatékonysággal. Halványítja a pigmentsejteket a szarurétegben lévő lipidekben és felhám felső rétegeiben.

✿ **Amino-etilfoszfátok:** Aktív hatóanyagok, melyek gátolják az új festékesjtek kialakulását, és késleltetik a már elhalványított pigmentfoltok újbóli megjelenését. Fokozzák a C-vitamin származékok pigmenthalványító hatását.

Mesoslim (Karcúsítás)

✿ **Articsóka kivonat:** természetes vízajtó hatású készítmény, segít feloldani a zsírcsomókat („ödémcsökkentő és méregtelenítő hatás”).

✿ **Laminária kivonat:** meggátolja az új trigliceridek felhalmozódását és csökkenti a már lerakódott lipideket („zsírszövet vékonyító hatás”).

✿ **Dipeptidok:** fokozzák a zsírégetést és csökkentik a zsírmolekulák kifejlődését („zsírbontó hatás”).

✿ **Édeskömény kivonat:** természetes illóolaj, mely fokozza a boldogsághormonok („endorfinok”) felszabadulását („sejt-anyagcsere fokozó hatás”).

Mesofirmness (Feszítés)

✿ **Szerves szilikon és kollagénes aminosavak:** erősíti a dermális mátrix kohéziós képességét („Feszítő hatás”).

✿ **Mikro-tengerifű részecskék:** rugalmasság fokozó, kollagén növelő hatóanyag („öregedésgátló hatás”).

✿ **Liposzómás polifenolok:** Az öregedési folyamat során meggyengült sejtek regenerálása. Bőrstimuláló hatás („bőrfiatalítás”).

Step by step MESOLIFT kezeléshez



1. Tisztítsuk le a sminket Aquatherm Sensitive Eye make-up Remover-rel.
2. Az arc tisztításához használjunk Aquatherm Cleansing Gel-t. Majd vízzel mossuk le és vigyük fel a Thermal Concentrate Water tonikot.
3. Következik a peeling hidroabrázióval. Majd lemosunk az arcot.
4. Egy kis üveg tálba tegyünk egy-két csepp Radiance Cleansing Gel-t és egy vizes peeling kefével felhabosítjuk, majd körkörös mozdulatokkal vigyük fel az arcra. Pár perc elteltével mossuk le az arcról kétszer.
5. A Thermal Concentrate Water-rel tonizáljuk a bőrt.
6. Tűs Mezotherápiás készülékkel végig megyünk az egész száraz arcon, hatóanyag nélkül, megnyitjuk a bőr pórusait.
7. Felvisszük a megfelelő mennyiséget az arcra a Deep Skin Layer ampullából, majd használjuk az iontoforézis készülékünket negatív pólushon.
8. A maradék hatóanyagot bemaszszírozzuk.
9. Feltesszük a Chrono-Programmed Outer Skin Layer ampullát és ismét használjuk hozzá a tűs mezotherápiás készülékünket.
10. Átitatunk egy gézlapot Aquatherm Thermal Concentrate Water-rel, amit felhelyezünk az arcra. Hideg vasalóval dolgozunk az egész arcon, így zárjuk a kezelést.



Harmati Ágnes ajánlásával

IONTO-SKIN ABRASION IONTO-SKIN® REGULATOR



Harmati Ágnes

Kozmetikus mester, dipl. szakoktató,
vizsgaelnökként
rendszeresen vizsgáztat.

A szépségiparban már hosszú évek óta folyik a küzdelem, hogy minden lehetséges eszközzel késleltessék ezt a folyamatot: számtalan hámlasztó krém, nyugtató maszk, hidratáló gél és ampulla hivatott megakadályozni a bőr ráncosodását, elősegíteni megfiatalodását, ám kétségteljesen az egyik leghatásosabb és azonnal látható, tartós eredményt hozó eljárás a mikropeelingezés, vagy más néven mikrodermabrázió. De mit is jelent pontosan ez a kifejezés? A bőr felső, elhalt rétegének eltávolítását mikrokristályok segítségével, amely kezelés után a sejtek önmegújító képessége felgyorsul, hatóanyag-felvétele javul, csökken a ráncok mélysége, elhalványodnak a foltok, hegek.

IONTO-SKIN® ABRASION

Az IONTO-SKIN® ABRASION arc- és testkezelő készülék egy steril vákuum kompresszor segítségével juttatja a bőrre a finom szemcsésű kristályokat, egyenletesen és teljesen fájdalommentesen lazítva fel a mikroszkopikus méretű bőrrészecskéket. Az eljárás során biztosítva van a teljes higiénia, mivel az elhasznált kristály és az eltávolított hámrészek egy külön, tet-szés szerint üríthető tartályba kerülnek. A kezelés elvégzése a következő esetekben ajánlott: kerges, durva bőrfelület, aknés, heges bőr kezelésére; műtéti és égési hegek eltávolítására, tág pórusok összehúzására, pigment-



foltok elhalványítására. A szarkalábak, ráncok kisimulnak, az újonnan képződött bőr feszes, friss és egészséges fényű lesz. A bőr kezelése során nincs kitéve semmilyen – esetlegesen allergiát okozó – maró kémiai hatásnak. A problémás terület nagyságától és fókától függően alkalmanként vagy kúraszerűen is alkalmazhatjuk az eljárást.

IONTO-SKIN® REGULATOR

A kozmetikai kezelés sikerét a szaktudás mellett nagymértékben befolyásolja a megfelelő termék és a kozmetika felszereltsége. Vendégeink rövid idő alatt eredményt mutató eljárást igényelnek, amely mellett fontos követelmény a relaxáció. Hogyan

érjük el ezt a mai világban? Megköveteli a pontosan megszervezett munkát, a munkafolyamatok tudatos sorrendjének felépítését, az egyéni foglalkozást (kabinrendszer). A hazai piacon elsőként az IONTO-COMED cég ezt biztosítja számunkra – a kényelmes és komfort érzetet – profi módon felépített géppark rendszereivel. A vendég relaxálását egy mikro-masszázs gép segítségével fokozzák. A kezelés megfelel az új trendnek is ahol a manuális munkát részesítik előnyben, mivel az eljárást a kozmetikus saját kezével végzi, így megteremtve a bensőséges kontaktust a pácienssel.

Az egészséges kötőszövet konstans folyadék háztartással rendelkezik, vagyis az oda- és elvezetés a test legkisebb részeibe is biztosítva van. Ez humorális (testnedv) úton történik, vagyis az ereken, a nyirkon, a sejteken stb. keresztül. A kötőszövet tehát az a szerv, amely az egyes sejtek életfunkcióinak a feltételeit biztosítja.

Az IONTO-SKIN® REGULATOR készülékkel történő masszázst Lymphdrainage. A mozgásokat bentről kifelé és fentről lefelé végezzük, szabályosan ismétlődő mozgatsorozatokkal. Hatóanyag vagy ampulla használata esetén a bőrt fóliával fedjük, – így egy dunszt hatást érhetünk el, amely során a hatóanyag könnyebben beszívódik a bőrbe – mi speciális kesztyűt húzunk és azzal végzünk masszázst a dekoltázsig. A kozmetikus és a vendég egyaránt csatlakoztatva van a készülékhez. A kezünk között egy erősen lüktető elektrosztatikus mező alakul ki, ezek az erők pontosan adagolhatók és egy vibráló, pumpáló effektust képeznek mélyen a kötőszövetben.

A nyirokvezetés felgyorsul, így egy nyirok-masszázsról beszélhetünk. Serkenti a vérkeringést, a feszült kötőszövetet ellazítja, az arc mimikai és mélyebben fekvő izmainak tornáztatásával izomtornát végez, így a bőr látványosan üde és kisimult lesz.

A vendég rövid idő után érzi a nyugtató hatást, az eljárás 10-15 perce alatt megnyug-



IONTO-SKIN® ABRASION
500 000 Ft + SKEYNDOR
ajándéksomag



Ajándéksomag!
SKEYNDOR Aquatherm
termékek
135 000 Ft
értékben!

szik. A kezelést kézi-masszázzsal érdemes folytatni, így a páciens közel 1 órán keresztül pihen, intenzív testkontaktusban részesül, pszichésen egy több órás alvásnak megfelelő nyugalmi állapotba kerül.

Mivel a cellulitisznél a kötőszövet anyagcserézavaráról van szó, ezzel a kezeléssel elősegíthetjük a salaktalanítást és az anyagcsere normalizálódását. Alkalmazhatjuk speciális hatóanyagos kezelések előtt is.

Összetett hatása során – a kötőszövetben a sejanyagcsere aktivizálása és a nyirokfolyadék normalizálása, az izomzat erősítése, izomgörcsök lazítása, az idegek és véredények salaktalanítása és relaxálása, az epidermisz hatóanyagfelvétele – fokozódik.

Kozmetikus kezelési javaslat a komplex arckezeléshez

Az arc alapos zsírtalanítása után a száraz bőrön kezdjük el a mikrokristályos lecsiszolást (IONTO-SKIN® ABRASION). Figyelembe kell venni a bőr típusát, érzékenységét, ennek megfelelően kell kiválasztani a kristály méretét (mikro vagy makro) és a kezelés időtartamát. Ezt követően gőzölünk (IONTO-HERB), felpuhító krémmel rövid masszázst végzünk. A bőrt steril (eldobható) vizes kendővel tisztítjuk, majd fertőtlenítjük.

A mikromasszázs (IONTO-SKIN® REGULATOR) készülék használata előtt felteszünk a bőrre egy hidratáló, nyugtató, regeneráló ampullát bőrtípusnak megfelelően+fóliával lefedjük, kb. 10-15 percig relaxáló nyirokdrénáz masszázst végzünk.

A kezelést kézi masszázssal folytatjuk a megfelelő masszázskrém kiválasztásával, majd felteszünk egy tápláló maszkot. A pakolást alagával egészíthetjük ki.

Végül a sort fényvédő tartamú hidratáló krémmel fejezzük be.

A Vendég bőre a kezelés hatására megnyugszik, bőrképe javul és látványosan megszépül, kérésére make-up-ot teszünk fel az arcra.

Mindenképpen hívjuk fel a figyelmét arra, hogy egy héten belül szolárium és napozás használata nem javasolt!

A kezelés időtartama kb. 1 óra, célszerűen (heti 1x) alkalmazni, de alkalmankénti használatával is eredményt érhetünk el.

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

Újdonság

BIOMATRIX-konceptió — Wellness & Beauty

IONTO-SKIN® REGULATOR

Tökéletes kikapcsolódás az Ön vendégének!

Az egyedülálló BIOMATRIX-konceptió a BIOMATRIX-maszk és a kézzel végzett mikromasszázs összjátéka. A kezelés összeköti a Wellness-t a szépségápolással és egy különleges élményt nyújt.



IONTO-SKIN® REGULATOR
190 000 Ft + SKEYNDOR
ajándéksomag

Ajándéksomag!
SKEYNDOR
Radiance Renewing
termékek
50 000 Ft
értékben!

A mikromasszázs

Szoktassa hozzá vendégét

A BIOMATRIX-konceptió teljes kikapcsolódást biztosít vendége bőrének. Ez a kezelés egyesíti az ellazulást és a szépség ápolást.

Ezt a kikapcsolódást vendége szeretni fogja!

A BIOMATRIX-kezelés egyszerű és gyors. A kezelés hatása kiváló, effektív rövid idejű, optimális, más kezelésekkal is összekapcsolható. A hatása rögtön látható.

Tapasztalat a BIOMATRIX-kezelési koncepcióról

„A kezelés valóban meglepett. A mikromasszázs és a BIOMATRIX-maszk kombinálása teljes ellazulást nyújtott. Amikor már nem jutott időm hosszabb kezelésekre, ez a módszer tökéletes megoldásnak bizonyult, és az eredmény rögtön látható volt.”

„A kezelés, tökéletes kikapcsolódást nyújtott a bőrömnek.”

A BIOMATRIX-maszk

A BIOMATRIX-maszk kollagén hatóanyagokból és különleges nedvességtartalommal áll. Már az első kezelés után bőrét frissebbnek és fiatalabbnak érezheti, a bőr felületén lévő foltokat eltünteti, és a ráncokat is csökkenti.

A BIOMATRIX-maszk 4 típusa

– BIOMATRIX Pure – kollagén
– BIOMATRIX Kaviar – kollagén + kaviárkivonat
– BIOMATRIX Aloe Vera – kollagén + Aloe Vera
– BIOMATRIX regeneráló – kollagén + allantoin és panteinol



A mikromasszázs egy IONTO-SKIN® REGULATORRAL végzett speciális masszázssal, mely lágy lüktetéssel nyugtat, és gondoskodik vendége teljes ellazulásáról:

- Arcbőr és izomlazító hatású.
- A véráramlatot élénkíti, és biztosítja a szövetek közötti oxigén ellátást.
- Alkalmazásával a BIOMATRIX- maszk hatóanyagait a bőr könnyebben fogadja be.
- Aktiválja a nyirokáramlatot, és biztosítja az optimális oxigén szállítást.

A BIOMATRIX-konceptió

A BIOMATRIX-maszk és a mikromasszázs együtt verhetetlen párosítás, mely teljes ellazulást és szépséget biztosít vendégének. Vendége elégedett lesz.

Mire van szüksége a sikeres BIOMATRIX kezeléshez?

BIOMATRIX-MASZK: Kiváló minőségű – kollagén maszk – 4 különböző hatóanyaggal

IONTO-SKIN® REGULATOR: Az IONTO-SKIN® REGULATOR egyszerű technikájú mikromasszázs. A kezelés során az Ön keze és a vendége között apró rezgések érezhetők. Az arc simítása közben apró vibrációt érez vendége az arcizmokon.

BEAUTY – gumi maszk: Latexből készült speciális maszk – ami a BIOMATRIX kezelésnél használatos.

A BEAUTY – gumi maszk összekötve a mikromasszázshoz tartozó BIOMATRIX-maszkkal garantáltan eredményes kezelést biztosít.

Kutassy Krisztina ajánlásával

IONTO-SONO LDM



Kutassy Krisztina

Orvosi- és sminktetováló kozmetikus mester,
1995 óta dolgozik a szakmában,
2004 óta készít professzionális
sminktetoválásokat.

A kozmetikában eltöltött évek alatt, mindig igyekeztem a vendégeimnek a lehető legtöbbet nyújtani, mind a szakmai tudásom fejlesztésével, mind pedig a felhasznált termékek és gépek alkalmazásával.

Vendégköröm fokozatos bővülésével adódott lehetőségem fejleszteni gépparkomat, valamint ezzel egy időben magasabb színvonalú krémeket, kezeléseket bevezetni vendégeim legnagyobb meglepedésére.

Szeretem elsőként kipróbálni magamon a legújabb eljárásokat, kezeléseket, hiszen az ember így tud hiteles képet alkotni a várható eredményekről. Így jutottam el, egy Beauty kiállítás után Solymárra is, az Ionto-Comed bemutató szalonjába.

A kiállítási standon készségesen mutatták be, az akkor újdonságnak számító mikrodermabrázió és LDM készülékeket, valamint sok információt illetve apró kezelésekre építhető „trükk”-öt osztottak meg velem.

Amikor pedig az első kezelésre elmentem hozzájuk a szalonba,

az utána látható és érezhető különbség abszolút meggyőzőtt a magasabb kategória tényleges hatékonyságáról.

Az LDM ultrahang azóta is a kedvenceim, és őszintén állíthatom, hogy a vendégeim közül, aki egyszer is kipróbálta, rendszeresen kéri a kezeléseibe építve. Amit igazán szeretek benne, az hogy bármilyen bőrtípust, problémát tudok kezelni vele akár arcon, akár testen. Legyen tinédzser, gyulladásos-tágporusú vagy középkorú a vendég, ahol feszesítésre szoruló arcbőrt kell kezelnem, ráncatlanítani. A különböző 20-40 perces programok mindenkinek látványos eredménnyel szolgálnak már az első alkalom után is.

Nagy kedvencek közé tartoznak a kúrakezelések, ilyenkor személyre szabott programot állítok össze, és az 5-10 alkalmas LDM kúrát egészítem ki Skeyndor kezelő szettel, illetve téli hónapokban annyira közkedvelt mikrodermabrázióval.

A legnagyobb örömet számomra, mindig a vendégeim pozitív visszajelzései okozák és az, hogy nem csak a bőrüket hanem az arcukon keresztül a belső kisugárzásukat is szépítem – erősítem.



Ajándécsomag!
SKEYNDOR
induló készlet kabin
és eladási termék
220 000 Ft
értékben!

Az LDM-technológia bőrre gyakorolt hatásai

A nagyobb frekvenciájú ultrahang hullámok az LDM technológia alkalmazásával felerősítve elősegítik:

- ✱ a jobb vízeloszlást,
- ✱ serkentik a kollagén- és elasztintermelést,
- ✱ megváltoztatják a kötőszövetben a térhálós kötések.

Az LDM technológia rendelkezik továbbá jó néhány sejtekre kifejtett hatással, mint:

- ✱ a sejtosztódás stimulációja,
- ✱ a proteinszintézis elősegítése,
- ✱ a membránszerkezetek módosítása, funkcióinak és áteresztőképességének megváltoztatása.



Az LDM-technológia esztétikai célú alkalmazása

- ✱ **Bőrfiatalítás:** a fibrociták elkülönítése, fibroblasztokká alakítása.
- ✱ **Bőr feszesítés:** a kollagén-szerveződések javítása által a sejten kívüli terek bővítése.
- ✱ **Cellulit:** a kötőszövet-szerkezetek javítása által a diffúziós folyamatok gyorsítása, az anyagcsere megfelelő fokozásával a zsírszövetekben.
- ✱ **A kötőszövet stimulációja:** a makrofágok úgynevezett fibroblaszt-stimuláló képességének fokozása 3 MHz frekvenciájú ultrahanggal. Egyidejűleg az 1 MHz-es frekvencia jobban képes stimulálni a faktor hatását. Csak a két különböző frekvencia kombinációja egy kezelésen belül tudja mindkét folyamatot optimálisan irányítani.
- ✱ **Hegyek, striák:** a kollagénháló-szerkezet módosításával a mikro-keringés és az anyagcsere javítása.
- ✱ **Akne,** akné utáni hegek kezelése.



Szalon

Szalay Adrienne ajánlásával

IONTO-EASY effect

A kozmetikai szalonokban egy teljesen új, minden eddig megszokottól eltérő eljárás hódít, ami nagyon látványos eredményt produkál. Nincs szükség szikére, a kezelés élvezetes, és látványosan elbánik a ráncokkal. Érdekes közelebről is megismerkedni vele.

A patronos módszert most még csak néhány szalonban alkalmazzák, én kipróbálásra az IONTO-COMED Szépségsszalonba kaptam meghívást. Mint megtudtam, olyan professzionális komoly hatóanyagokat zárnak steril módon az egyes kapszulákba és a hozzá tar-

tozó kis berendezéssel olyan mélyen viszik a bőrbe, hogy a kezelés eredménye szinte egy kisebb plasztikai műtéttel felér. A bemutató kezelés abszolút meggyőzőtt és én az alábbiak szerint alkalmazom a kezelést a saját szalonomban:

Kozmetikus kezelési javaslata komplex arckezeléshez

Hagyományos módon, bőrtisztítással kezdem a kezelést, majd jöhet a várva várt csoda, a patronos kis berendezés, amelyre különböző fejek csatlakoztathatók, és erre pattintja rá a kozmetikus a szakszerűen kiválasztott patronot. Felmérem, hogy mire van éppen szüksége a vendég bőrnek. Az elektrokozmetika új generációjának minden tudását használó készülékkel (Ionto-Easy effect) olyan kezelésre képes a szakember, amellyel az arc izmai feszesíthetők. Első lépésben az olajos peelinges kapszulát használom, aminek óriási előnye, hogy miközben eltávolítja az elhalt hámsejteket, megszünteti a bőr egyenetlenségeit, és képessé teszi a további hatóanyagok felvételére, sőt ezen túl egyben táplálja is a bőrt, fokozza vérkeringését és megtornáztatja az arcizmokat is. Az első kapszula után határozottan érzi a vendég, hogy az arcát átmozgatta a gép. Ezután a legalkalmasabb a bőr a különböző hatóanyagok beszippantására és hasznosítására. Majd következik a bőrtípusnak megfelelő feltöltő kapszula kiválasztása. A patronos kezelés második lépése lehet mikroárammal történő anti-aging, vörös fényel történő lifting feszesítő vagy hideg kék fényel történő nyugtató és gyulladáscsökkentő program kifejezetten problémás bőrre. Először a hatóanyagot helyezem sávos mozdulatokkal az arcra, majd masszírozó mozdulatokkal a patronos fej tíz percig finom bizsergető érzéssel pásztázza a vendég arcát. Közben elmondom a vendégnek, mi-



Szalay Adrienne

Szakképzett kozmetikusként 20 éves szakmai tapasztalattal, igyekszem kiszűrni vendégeim számára a kozmetikai ipar által felfedezett újdonságokból azokat a kezeléseket, termékeket, amelyekkel azonnali és hosszú tartó eredményeket tudunk elérni. Céлом, hogy Vendégeim a minőségi szolgáltatások igénybevétele miatt, mind testi, mind lelki felüdülést nyerjenek nálam. Arckezeléseink között a hagyományos kezelésektől a luxusig minden megtalálható az egyéni igényeknek megfelelően.

lyen kölcsönhatás van a fényforrások és a patronokba zárt hatóanyagok között. A fényterápiához különböző kezelő fejeket: vörös és kék színű intenzív LED fényforrásokat használhatunk, attól függően, hogy nyugtatni, feszesíteni vagy ráncalanítani szeretnénk a vendég bőrét. A kapszulákba zárt hatóanyagok egyedi technológiával készülnek, és használatukkal személyre szabható steril és erős koncentrációjú hatóanyag juttatható a bőrbe. Ezt tehát már a XXI. szá-

zad kozmetikája, ahol a bőr megújulását és a steril kapszulákba zárt hatóanyagok felszívódását speciális fényterápia és mikroáram támogatja.

A készülék által használt elektromos jelek aktiválják az arcbőr alatt lévő izmokat, erősítve ezzel az izomrostokat. A karbantartott arcizmok kisimítják a mély ráncokat, megszüntetik a finom szarkalábakat. A kapszulákba zárt hatóanyagok egyedi technológiai rendszert jelentenek, biztosítva a személyre szabható steril, erős koncentrációjú hatóanyagok bevitelét. A patronos kezelés utolsó fázisa egy kézi arcmasszázs.

IONTO-EASY effect
199 000 Ft + SKEYNDOR
ajándékcsomag



Ajándékcsomag!
SKEYNDOR Natural
Defense termékek
46 000 Ft
értékben!

Már egy kezelés is óriási ajándék a bőrnek, amit nagyon sokáig élvezhetünk, de igazán kúraszerűen ajánlom, négy kezelést, hetente egyet, ami aztán hosszú hónapokon át megtartja hatását.

SKEYNDOR MEN – Professzionális és eladási termékcsalád férfiaknak

**SKEYNDOR
MEN**



Az utóbbi években a férfiak érdeklődése megnőtt a szépségápolási termékek iránt. Kezdi felfedezni – néha partnereik ösztönzésére – a férfikozmetikumok jótékony hatását.

A változás tehát megkezdődött, az igények megnöttek, és a szépségipar a jövőben ezt már nem hagyhatja figyelmen kívül.

A férfiak törődni akarnak a külsejükkel.

Ebben segít a SKEYNDOR – MEN, férfiak számára kifejlesztett vonala. E termékek figyelembe veszik a férfiak napi bőrápolási igényét, megfelelő higiéniát és jó közérzetet biztosítva számukra egy olyan világban, ahol az ápoltság megjelenés fontos szerepet játszik.

A SKEYNDOR MEN termékcsalád készítményei egyaránt alkalmasak otthoni bőrápoláshoz és kabinkezelésekhez, esztétikai problémák széleskörű és hatékony kezelésére a még fiatal, és a már idősödő férfi bőr esetében is.

Az aktív hatóanyagok csoportját az eltérő korú bőr igényei alapján állítottuk össze, azaz:

- a 30 év alatti férfiak és a
- a 30 év feletti férfiak számára



A férfi arc bőr otthoni ápolásának elmaradhatatlan kellékei:

- ✿ **Méregtelenítő arclemosó mindennapos használatra:** Mélytisztító hab, mely hármass hatású: alaposan tisztít, visszaállítja a bőr savköpeny egyensúlyát, és sejtmegújító hatással is rendelkezik.
- ✿ **Bőrkisimító borotvazselé:** Egy zselé a gyors és irritáció nélküli borotválkozásért. Habja megemeli a szőrszálakat, megkönnyítve ezzel a penge siklását a bőrön.
- ✿ **Mattító 24 órás hidratálótej:** Mélyhidratáló emulzió, mely csökkenti az arc bőr csillogását és zsírosodását.
- ✿ **Kipirosodást gátló borotválkozás utáni balzsam:** Intenzív frissítő balzsam, mely csökkenti a borotválkozás okozta irritációt.
- ✿ **Energizáló bőrfiatalító szérum:** Egy szérum, amely energiával tölti fel az arc bőrt. Szibériai ginzeng tartalma stimulálja a sejtek anyagcseréjét és javítja az immunrendszer működését.
- ✿ **Szemkörnyék ápoló gél:** Gyulladáscsökkentő, feszesítő gél a szemkörnyéki fáradtság nyomainak eltüntetésére, a duzzanatok, táskák mérséklésére.
- ✿ **Haskarcúsító krém-zselé férfiaknak:** Ápolókrém a has környékének gyors és hatékony karcsúsításához.

HIDRATÁLÓ ARCKEZELÉS FÉRFIAKNAK – Kabinkezelés lépésről lépésre

- 1 Mélyhámlassztó zselé mikrokristályokkal: tisztító zselé mikrokristályokkal, kifejezetten férfiak arc bőrére kifejlesztve. Sárgánycsín kivonatát dúsítva, mely fertőtlenítő, bőrfiatalító hatással van a borotválkozás utáni arc bőrré.
- 2 Mélyhidratáló szérum: aktív taurin tartalma szabályozza a sejtek vízleadását, és megakadályozza a bőr hirtelen vízvesztését.
- 3 Stresszoldó-frissítő masszázskrém: professzionális krém, hosszan tartó masszázshoz. Nincs zsíros állaga, nem hagy olajos érzést a bőrön.
- 4 Feszesítő arcmasszk: Lehúzható arcmasszk a megereszkedett bőrszövet feszesítésére. Hidratál és javítja a bőr rugalmasságát. Melegítő hatása révén fokozza a biológiai hatóanyagok bőrbe jutását. Friss mangó kivonatot tartalmaz.
- 5 Befejezésül a Deep Moisturizing Concentrate maradék részét helyezzük fel az arcra és nyakra.



A férfiak bőre


A férfiak bőre eltérő élettani tulajdonságokat mutat, mint a nőké:

- Sokkal ellenállóbb a külső káros hatásokkal és ezzel egyidejűleg a természetes okozta bőrkárosodással szemben is.
- Normál körülmények között a férfiak bőre csak alapgondozást igényel, melynek célja, hogy segítsen fenntartani bőrük alapvetően jó védekezőképességét.
- Az epidermisz (külhám) 30%-kal vastagabb és 20 %-kal több szarusejtet tartalmaz, mint a nőké,
- ezáltal nagyon jó a vízmegkötő képessége,
- kiválóan tud védekezni a külső káros hatások ellen.
- Nagyon jó a hajszálerek vérellátása, a bőr mikro keringése,
- emiatt jobb a sejtek oxigén-ellátottsága,
- nő a sejtlégzés hatékonysága.
- A bőrükben található kollagén rostok erősebbek,
- a magasabb kollagén tartalom miatt feszebb bőr,
- a ráncok később jelennek meg.
- 75%-kal több faggyútermelés
- fokozottabb hajlam a bőr zsírosodására és a
- különféle szennyeződések kialakulására.

A férfiak bőrének „gyenge pontja”, amikor az öregedés megkezdődik, a folyamat sokkal gyorsabban zajlik le.

Fontos, hogy a bőrt megfelelő esztétikai és higiéniai állapotban tartsuk. A mindennapi alapápolásra fordított törődés hosszabb távon megtérül, mert késlelteti az első ráncok megjelenését.

A természetes ellenség: a borotválkozás.

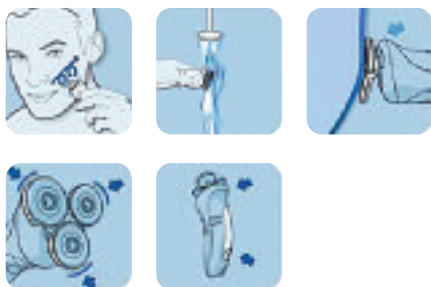

A borotválkozás irritációt okoz, megszünteti a bőr természetes védekezőképességét, emiatt az érzékeny és védtelenné válik a környezeti káros hatások ellen.

A **SKEYNDOR MEN** professzionális termékcsalád kifejlesztésénél a két legfontosabb szempont a következő volt:

1) MEGTARTANI a kiváló alaptulajdonságokkal rendelkező bőr egyensúlyát (homeosztázisát, azaz önszabályozó folyamatainak egyensúlyi állapotát)

2) KORRIGÁLNI az apróbb esztétikai hibákat, eltüntetni a kisebb szennyeződések, melyek egyaránt előfordulnak a fiatal és az idősebb férfiak esetében is.

1) AZ EGYENSÚLYI ÁLLAPOT MEGŐRZÉSE

Gondosan kiválasztott speciális hatóanyagok kombinációja garantálja a bőr természetes működési funkcióinak és tulajdonságainak védelmét és támogatását.

A **SKEYNDOR MEN** termékeinek három legfontosabb aktív hatóanyaga:

- **SZERVES SZILÍCIUM:** erősíti a szövetek szerkezetét és fokozza regenerálódásukat.
- **C – VITAMIN:** növeli a bőr természetes védekezőképességét és késlelteti az idő múlásának és a fáradtság nyomainak megjelenését az arcon.
- **TERMÁLVÍZ:** feszesíti, normalizálja és ásványi anyagokkal tölti fel a bőrt.

Természetesen ezeken kívül még nagyon sok más hatóanyagot tartalmaznak.

2) A BŐRHIBÁK KORREKCIÓJA

KORRIGÁLNI az apróbb esztétikai hibákat, eltüntetni a kisebb szennyeződések, melyek egyaránt előfordulnak a fiatalabb és az idősebb férfiak esetében is.

- **Széles spektrumú hidratáló összetevők:** Megakadályozzák a bőr kiszáradását, kipirulását és egyben feszesítő hatásúak.
- **TAURIN:** egy olyan aktív hatóanyag, mely szabályozza a sejtek vízleadását, segít megakadályozni a bőr folyamatos vízvesztését, ezáltal csökkenti a dehidratációt.
- **DERMOZACHARIDOK:** növényi eredetű szénhidrátok, melyek képesek hozzákapcsolódni a szarusejtkezek. Folyamatos hidratációt biztosítanak a hámrétegnek, egyúttal ellenállóbbá teszik a gyakori mosdás és az annak

eredményeképpen esetlegesen fellépő irritáció ellen.

• **Faggyútermelést szabályozó és csillogást csökkentő aktív hatóanyagok.**

– Alapvető fontosságuk van az arcbőr egészséges külsejének megtartásában és a szennyeződések elszaporodásának megakadályozásában.

– **Üreges szerkezetű mikrorészecskék**

• Felszívják a nap folyamán keletkezett felesleges faggyút és zsírt, a bőr így matt és egyenletes tónusú lesz. Azonnali hatás.

– **Enantia Chlorantha** afrikai fa kérgének kivonata

– Szabályozza a bőr természetes zsírtermelését, rugalmassá teszi a pórusokat, normalizálja a zsíros és kevert típusú bőrt. Középtávon kifejtett korrekciós hatása van.

Kétféle professzionális férfi arckezelés található a palettánkon: hidratáló és energizáló. A doboz egy komplett arckezelésre való hatóanyagot tartalmaz.

EXPRESS GYORSASÁGGAL ÉLÉNKÍTŐ TERMÉKEK – PROFESSZIONÁLIS CSOMAG

Ideális kezelés a stressz hatásnak kitett, fáradt bőr számára



INTENZÍV HIDRATÁLÁS – PROFESSZIONÁLIS TERMÉKCSOMAG

Ideális kezelés a rendkívüli környezeti hatásoknak kitett bőr számára.



Munkaszék II

Görgős munkaszék lábtartó gyűrűvel, állítható a magassága, az ülő-része és a háttámlája.

2 db 5 éves **40 000 Ft/db**

Új ár 85 000 Ft

A fénykép illusztráció!

**IONTO-UNIVERSAL A1 – a kis kompakt**

Az UNIVERSAL A1 egy félautomata kezelőszék elektromosan állítható magassággal a különösen alacsony beülési pozíciótól, 51 cm-től a masszázspozícióig, 85 cm-ig. Elegáns design-nal és kevés helyi-génnyel rendelkezik, ezáltal ideális kis kabinokba.

1 db 3 éves, jó állapotban **290 000 Ft**

2 db 6 éves **250 000 Ft/db**

Új ár 370 000 Ft

A fénykép illusztráció!

**Komplett Körmös Sarok**

Manikűr asztal elszívóval, kéztartóval, fiókos görgős szekrény, polcos szekrény, görgős ülőke, asztali lámpa.

1 éves, bemutató darab **199 000 Ft**

Új ár 299 000 Ft

A fénykép illusztráció!

**PROFI – készülék- és hatóanyagállvány**

Stabil, sokoldalúan felhasználható hatóanyagtartó modern design-ban. A 4 db görgő segítségével könnyen mozgatható, rögzíthető. Az üvegpolcok, melyek edzett üvegből készültek, nagy rakodó-felülettel rendelkeznek. A magas műanyag kerettel rendelkező polc az apróságok elrejtését szolgálja. A polcok forgathatók és készülékek tárolására is alkalmasak.

1 db 2 éves, jó állapotú **130 000 Ft**

Új ár 240 000 Ft

A fénykép illusztráció!

**IONTO-UNIVERSAL TYP K3**

Stabil, mechanikusan szabályozható kezelőágy, állítható a háttámla, a lábrész, a dőlésszög és a kartámaszok.

2 db 2 éves, bemutató darab **125 000 Ft/db**

Új ár 249 000 Ft

A fénykép illusztráció!

**IONTO-KABINETT**

Hatóanyagállvány 3 db polccal, biztonsági görgőkkel, lámpakonzollal. Wenge és juhar színben. Méret (m x sz x m): 800 x 663 x 318 mm

2 db 2 éves, bemutató darab **19 900 Ft/db**

Új ár 55 000 Ft

A fénykép illusztráció!

**Használt IONTO-COMPACT rendszer**

Univerzális arc- és testkezelő rendszer. Modern formatervezésben az eszköztároló ergonomiailag megfelelően került beépítésre. Gombnyomással választhatók ki az egyes programok.

Tartalma:

- tartozék szett: 13 részes
- IONTO-PEEL: peelingező
- IONTO-VAC SPRAY: vákuummasszírozó, tisztító, permetező
- IONTO-SKIN® REGULATOR: mikromasszázs
- IONTO-GALVANO: iontoforézis
- IONTO-ICE & HEAT: hideg/meleg arcvasaló
- IONTO-HF: vió
- IONTO-HERB: acéledényes gyógynövényes gőzölő

1 db 2,5 éves, megkímélt állapotban **590 000 Ft**

1 db, 5 éves, jó állapotban **490 000 Ft**

Új ár 990 000 Ft

A fénykép illusztráció!

**Ionto-Sono**

Ultrahang készülék arc- és testkezelésekhez, 21 beállított programmal. 1 és 3 MHz beállítási lehetőséggel.

1 db 4 éves **300 000 Ft**

Új ár 699 000 Ft

A fénykép illusztráció!



Használt IONTO-PROFI RENDSZER

Mikrochip által vezérelt univerzális arc- és testkezelő rendszer. Modern formatervezésben az eszköztároló ergonomiailag megfelelően került beépítésre. Egy képernyőn gombnyomással választhatók ki az egyes programok.

Tartalma:

- 3 db PROFI üvegpolc
- tartozék szett: 13 részes
- IONTO-PEEL: peelingező
- IONTO-VAC SPRAY: vákuummasszírozó, tisztító, permetező
- IONTO-SKIN® REGULATOR: mikromasszázs
- IONTO-GALVANO: iontoforézis
- IONTO-ICE & HEAT: hideg/meleg arcvasalo
- IONTO-HF: vió
- IONTO-HERB: acéledényes gyógynövényes gőzölő
- Nagyító lámpa

1 db 2 éves, új tartozékokkal **790 000 Ft**

1 db 6 éves, új tartozékokkal **550 000 Ft**

Új ár 1 490 000 Ft

A fénykép illusztrációt!



Használt IONTO-SKIN ABRASION

Mikrodermabráziós arc- és testkezelő készülék. Mechanikusan szabályozható vákuummal és kristálysórással.

Az abrasion a mikropeelingnek egy modern és hatásos módszere. Egy irányított, finom mechanikai hatásra a bőr felső rétegét eltávolítjuk, ezáltal a bőr egy jelzést kap a gyors regenerálódáshoz, vagyis új sejteket épít. A megújult, sértetlen sejtek a felső bőrrétegbe hatolnak és pótolják az eltávolított felső hámréteget. A folyamat által új, egészséges bőr képződik, amely nagyobb mértékben képes a hatóanyagokat felvenni. A kezelés eredménye egy optimális bőrképet mutat. Olyan bőrproblémákat kezelhetünk az eljárással, mint a heg, ránc, tágpórusú bőr, pigment-foltok, striák, aknék.

1 db 2,5 éves **330 000 Ft**

Új ár 500 000 Ft

Frissen szervizelve (szűrő csere, vákuum ellenőrzés, tisztítás).

A fénykép illusztrációt!



Használt INFRATRÉNER

Az infratréner (infrabicikli) az infralámpa és a kontrollált mozgás kombinációja, mely egy forradalmian új technológia a cellulit ellen. Az infralámpa mélyreható infravörös melege ellazítja az izmokat és serkenti a vérkeringést, így hatékonyabb a szövetek oxigén és tápanyagellátása. Szigorú pulzus-kontroll mellett 40-50 percet kell eltölteni könnyű tekeréssel a berendezésben, ez alatt szervezetünk 600-800 kalóriát éget el. Rendkívül hatásos eszköz a méregtelenítés és testsúlycsökkentés terén, illetve az alakformálásban is, mivel a kezelések alatt nagy mennyiségű méreganyagokkal telített folyadék távozik a szervezetből verejtékezés útján. Egy intenzív, 15 kezelésből álló kúra várható eredménye 3-8 kg fogyás.

1 db 2 éves **1 350 000 Ft**

Új ár 2 900 000 Ft

A fénykép illusztrációt!



Használt IONTO-LIFT BF izomstimuláló készülék arcra és testre

Az IONTO- LIFT BF „Body and Face” készüléket az IONTO-COMED GmbH K. Meyer Wardennel, a karlsruhei Műszaki Egyetem professzorával együtt fejlesztette ki. Ez egy többfunkciós berendezés, mely arc- és testkezelésre használatos. A közép-frekvenciás stimuláló készülék egy apoláris stimulációs elven működik. Az alacsonyfrekvenciás jel váltakozása az izomzat szelektív stimulációját váltja ki. Az alacsonyfrekvenciájúhoz hasonlóan, a közép-frekvenciás stimuláció is az izomzat fájdalommentes stimulálását idézi elő. Az IONTO – LIFT BF többfunkciós berendezés a test és az arc módszeres regenerálódását teszi lehetővé. A programkártyák a kezelési eljárások számtalan fajtájához kaphatóak.

Felhasználási területek arcon: orca, áll, száj, homlok, szem.

Face Aktive: fáradt, rossz vérellátottságú, száraz, atrófiás bőrre.

Face Relax: mimikai ráncokra, letapadt izmokra, izomgörcsökre.

Face Lifting: atrófiás, regeneráció igényes, petyhüdt bőrre.

Felhasználási területek: mell, felkar, hát, has, derék, ülep, comb, láb.

Body Slimming: zsírányagcsere fokozás nem beteges túlsúlynál.

Body Toning: az izomzat és a kötőszövet erősítése.

Body Cellulite: cellulitisz kezelés, a kötőszövet erősítésére, feszítése vérkeringés aktiválása.

Body Drainage: a nyirokfolyadék elvezetése, a vérkeringés fokozása.

1 db 6 éves, használt, de jó állapotú **350 000 Ft**
testkezelő-rendszer, tartozékokkal

Új ár 890 000 Ft

A fénykép illusztrációt!



Einfach gut behandelt

Cosmetic Trade Kft.

2083 Solymár, Terstyánszky út 68.
Hungary

Tel.: (+36) (26) 36 29 29 • Fax: (+36) (26) 56 41 14

www.ionto.hu, www.skeyndor.hu
info@ionto.hu, info@skeyndor.hu

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

Az árváltozás jogát fenntartjuk, nyomdai munkából eredő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!

Refectocil szempillafesték, különböző színekben

9872 natúrbarna, 9873 kékesfekete,
9875 fekete, 9876 világosbarna, 9876.11 vörös,
9876.12 gesztenyebarna, 9876.13 szőke
15 ml



1100 Ft helyett

850 Ft

lash szempillafesték, különböző színekben

30 ml, barna, fekete,
kékesfekete színekben



2900 Ft helyett

2500 Ft

Cipővédő, kék

500 Ft

50 db

800 Ft

100 db

**Lávakőszett**

Készülék + 34 db különböző
méretű lávakő



59 900 Ft helyett

45 900 Ft

Frottír fejpánt, tépőzáras

1500 Ft

helyett



1100 Ft

Frottír lemosó kesztyű, 1 pár

2900 Ft

helyett



1900 Ft

Flíz huzat

Minden kezelőágyra teríthető,
többször mosható védőhuzat

1090 Ft

helyett



990 Ft

Flíz sapka, mosható, 100 db

2800 Ft

helyett



1900 Ft

Frottírhuza munkaszékre

Fehér, Ø 35 ill. Ø 40 cm

4000 Ft

helyett



1500 Ft

Vinyl- és Latex kesztyű

100 db, 3 méretben

3390 Ft

helyett



1990 Ft

Vesetál szett

2490 Ft

2 db

**Speciális gumiból készült keverőtál, maszkok, modelage kikeveréséhez**

11 cm, fehér vagy zöld színben

990 Ft

helyett



650 Ft

Nagyítós lámpa

Fehér, 3 dioptriás lencsével,
asztali lámpakonzollal



29 900 Ft helyett

19 900 Ft

Asztali lámpakonzol

Fehér, kompatibilis minden lámpához



4500 Ft helyett

1500 Ft

Kozmetikai lemosó szivacs

4 db

1190 Ft helyett



950 Ft

Azulénos gyantázó

10 990 Ft

**Azulénos koronggyanta**

500 gramm-os kiszerezésben

3000 Ft helyett



2400 Ft

Roll-on gyantázó készülék

Fehér színben

3600 Ft helyett




3000 Ft

Előjegyzési kártyák

Wellness, Kozmetika, Pedikűr

1590 Ft

50 db / csomag

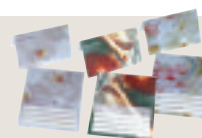**Ajándékutalvány**

Wellness, Kozmetika, Pedikűr

2000 Ft

25 db / csomag

